

Oosafe®

Brugsanvisning Oosafe® Desinfektionsmiddel

Dok.nr. OODIS-21 Rev. Nr. 07 Rev. Dato 31.05.2022



Anvendelsesområde

Oosafe® Disinfectant er et overfladedesinfektionsmiddel baseret på kvaternære ammoniumforbindelser velegnet til medicinsk udstyr - dentale og kirurgiske instrumenter. Produktet er beregnet til at desinficere ikke-porøse overflader og er effektivt mod bakterier, gær, vira og mykobakterier (se tabel nedenfor). Grundet af ingen frigivelse af flygtige organiske forbindelser (VOC) og ingen duft er det et gunstigt desinfektionsmiddel til medicinsk udstyr i laboratorier, inklusive dem med et lavt ventilationsniveau.

Desinfektion af en overflade udføres for at forhindre spredning af infektionssygdomme, og den bruges til at hæmme aktiviteten eller destruere skadelige mikroorganismer for at beskytte mennesker ved forbehandlingen af medicinske instrumenter. Overfladen skal være ren, før desinfektion kan finde sted.

Anvendelse

- **Anbefalet ventetid:** 15 min (se tabel)
- **Anbefalet brug:**
- **Påfør ufortyndet**
- **Metode A - Spray:** Sørg for, at overfladen, der skal desinficeres, er ren. Spray og fordel desinfektionsmidlet jævnt på overfladen med en steril klud. Vent 15 min på desinfektionseffekten.
- **Metode B - Servietter:** Sørg for, at overfladen, der skal desinficeres, er ren. Tør overfladen jævnt af og vent 15 min på desinfektionseffekten.

Egenskaber

- gennemsigtig og lugtfri
- klar til brug
- alkoholfri
- ikke-VOC-frigivende
- effektiv mod mykobakterier
- effektiv mod kappevira, herunder HIV, Hepatitis B og C, Herpes simplex, Influenza A, Ebola, også Adenovirus og Poliovirus
- forårsager ikke korrosion af metaller

Holdbarhed

Efter åbning af Oosafe®-desinfektionsmiddelflasker eller -beholdere bevares blandingens stabilitet i 3 år under de korrekte opbevaringsforhold.

Opbevaring

- Opbevar produkter på et tørt sted (ideelt luftfugtighedsområde på 30 – 50 %) ved en temperatur mellem 15 °C til 30 °C
- Undgå direkte sollys

Effektivitet

Aktivitetsspektrum	Metode*	Kontakt tid
Baktericide <i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>	EN 13727+A1 EN 1040 EN 14561 EN 13727+A2	5 min 15 min 15 min
Gærdræbende <i>Candida albicans</i>	EN 1275 EN 13624 EN 14562	5 min 15 min 15 min
Mykobaktericid og tuberkulicid <i>Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae</i>	EN 14348 EN 14563	15 min 15 min
Virucidal <i>Vaccinia virus**</i>	EN 14476+A1	15 min
<i>Poliovirus</i>	EN 14476	15 min
<i>Adenovirus</i>	EN14476+A1	5 min

*Effektiviteten er testet for rene forhold

**Effektivitet mod alle indkapslede vira inklusive HIV, Hepatitis B og C, Herpes simplex, influenza A, Ebola

Emballagetype

Emballagetype	Produktkode
1. 50 ml, sprayflaske	OOMD-00050
2. 250 ml, sprayflaske	OOMD-00250
3. 1L, sprayflaske: individuelt pakket i kartonen	OOMD-01000
4. 5L, genopfyldningsbeholder, individuelt pakket i papbeskyttelsen	OOMD-05000
5. 10, genopfyldningsbeholder, individuelt pakket i papbeskyttelsen	OOMD-10000
6. Servietter, spand med 70 servietter	OOMDW-120

Sikkerhedsoplysninger

Farlig reaktion:

Ingen farlige reaktioner er kendt, hvis produktet anvendes og opbevares i henhold til specifikationerne

Toksikologiske oplysninger:





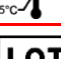
- På huden:
Ingen kendt irritation.
- I øjet:
Skyl straks med vand, hvis der opstår irritation. Kontakt lægen, hvis irritationen fortsætter.
- Indtagelse:
Skyl munden og drik rigeligt med vand. Kontakt en læge.
- Indånding:
Der kræves ingen særlige foranstaltninger. Tilføj frisk luft og søg læge, hvis der er ubehag.
- Sensibilisering:
Ingen sensibiliserende virkning er kendt.
- Overvejelser om bortskaffelse:
P501 Bortskaf indholdet/holderen i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

For yderligere information om industriel sikkerhed henvises til Oosafe® Disinfectant sikkerhedsdatablad.

Meddelelse til bruger:

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren er etableret.

Symboler på produktets primære emballagelabel

Symbol	Beskrivelse af symbolet
1. 	Fremstillingsdato
2. 	Opbevares tørt
3. 	Se brugsanvisningen eller se elektronisk brugsanvisning
4. 	Fabrikant
5. 	Sidste anvendelsesdato
6. 	Temperaturgrænse
7. 	Batchkode
8. 	Overensstemmelsesmærke med det bemyndigede organs identifikationsnummer